



Helping all people
live healthy lives


BD プッシュボタン ブラッドコレクションセット




Photo :
ホルダー接続時

- 針刺し損傷の確率が高い翼状針だから、安全性と使いやすさにこだわりました。
- 指でボタンを押すだけで、簡単に安全機能が作動します。
- 採血針が血管内にある状態で安全機能を作動させるので、抜針後の針刺し損傷を防止できます。


指でボタンを押すだけの簡単操作

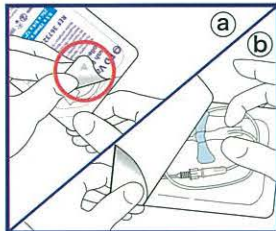


- ※この間、誤まってボタンを押さないよう注意してください。
1. ① 包装に記された矢印部分から開封します。
 - ② 本体を図のように指でつまんで取り出し、ホルダーに接続します。

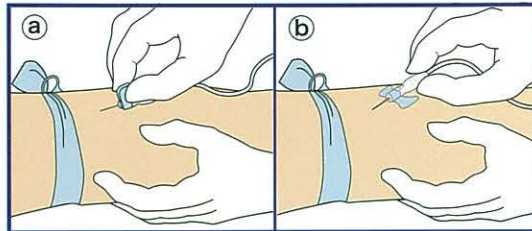

2. 針カパーをまっすぐ引いて取り外し、① ② いずれかの方法で穿刺します。
- ① 親指と人差し指でウイング部を持ち穿刺します。
- ② 本体部分を持ち穿刺します。

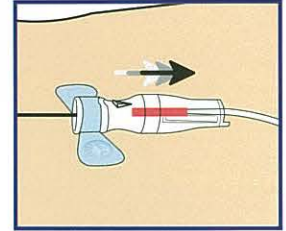


3. 血液のバックフローを確認します。

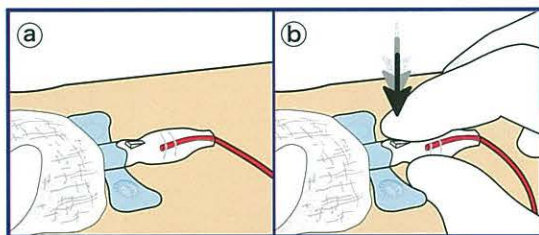


4. ① 採血後、滅菌ガーゼを穿刺部位にあてがい針管の先端を覆います。
- ② 穿刺したままの状態では本体を持ち、ボタン(▼印部分)を押します。

※安全機能作動の妨げになるため、本体後方部分に触らないよう注意してください。

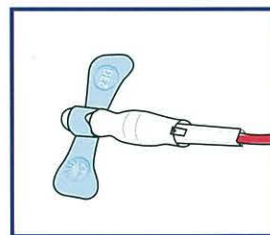

5. 針が完全に本体に収納されたことを確認します。

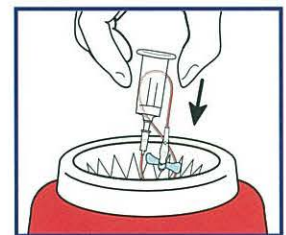

6. ホルダーから外さず一体のまま、速やかに耐貫通性廃棄容器に廃棄します。

BD プッシュボタン ブラッドコレクションセット

カタログ番号	カラー	針サイズ	付属チューブの長さ	ルアーアダプター	出荷単位
367344		21G 3/4	12インチ	有	50本/箱
367342		23G 3/4	12インチ	有	50本/箱

販売名: BDバキュティナブラッドコレクションセット
医療機器認証番号 220AFBZX00064000

BD バキュティナ™ シングルユースホルダー

カタログ番号	内容	出荷単位
364815	単回使用採血ホルダー	1000個/箱 (250 x 4)

販売名: BDバキュティナシステム
医療機器認証番号 15000BZY00702000

*BD、BDロゴおよびその他の商標はBecton, Dickinson and Companyが保有します。©2009 BD



製造販売元
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
〒960-2152 福島県福島市土船字五反田1
本社: 〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ
www.bd.com/jp/

◆ 製品関連・資料請求
お客様情報センター


◆ 注文・納品・在庫のお問い合わせ
受注管理

☎ 0120-8555-90
FAX : 024-593-5761

BD バキュテイナ® プッシュボタンブラッドコレクションセット 使用方法

採血に使用する場合


▼部分がボタン部分

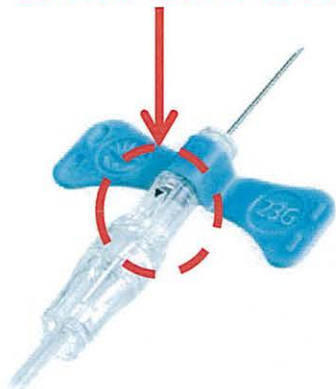

パッケージ



パッケージの上からボタン部分を
押さないように注意！
(○部分)

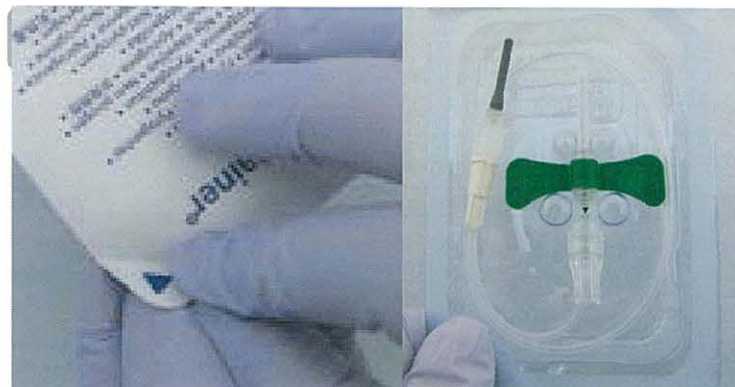

1. ▲印から開封します。(▲印を手前にし、開封することで翼状針を取り出し易くなります。) 翼状針と刺ダガーを接続します。

2. 取り出し



2. 翼状針の本体を指でつまみ、取り出します。この時ボタンを触らないように注意！

3. 穿刺




3. 本体部分を持ち穿刺します。本体部分を持つことで逆血が確認しやすくなります。採血中はボタンを触らないよう注意！

4. 抜針の準備



4. 採血終了後、アルコール綿で穿刺部位と本体先端を覆います。

5. 抜針

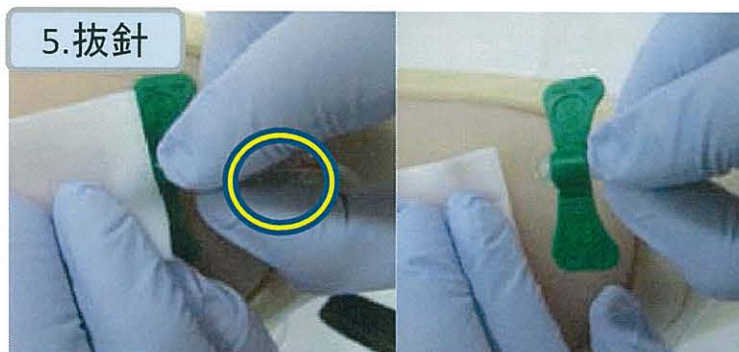


5. 穿刺したままの状態では本体を持ち、ボタンを押します。抜針前には患者さんに「パチッ」と音がしたら採血終了ですとお声掛けをしましょう！抜針時、作業の妨げになるので本体後方部分を(左写真○印)を触らないように注意！

6. 廃棄



6. 採血後は針が完全に本体に格納されたことを確認します。針はホルダーから外さず一体のまま速やかに耐貫通性廃棄容器に廃棄します。

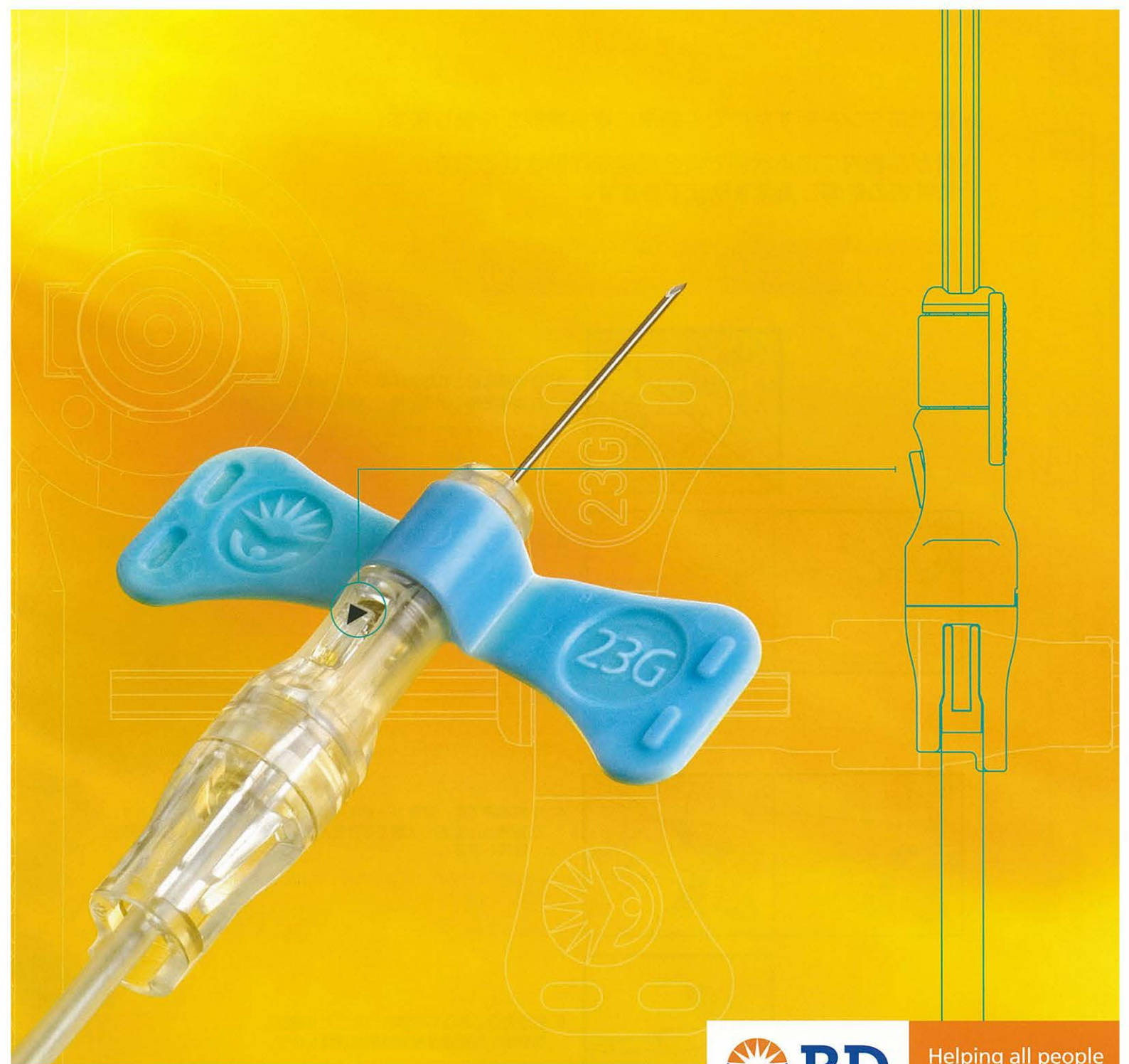


Helping all people
live healthy lives


BD プッシュボタン・ インフュージョンセット

- 指でボタンを押すだけで、簡単に安全機能が作動します。
- 針が血管内にある状態で安全機能を作動させるので、抜針後の針刺し損傷を防止できます。

指でボタンを押すだけの簡単操作

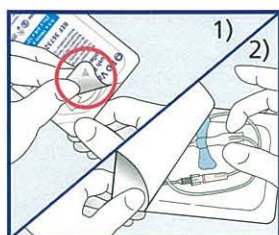


- 1) 1) 包装に記された矢印部分から開封します。
2) 本体を図のように指でつまんで取り出します。
※誤まってボタンを押さないよう注意してください。

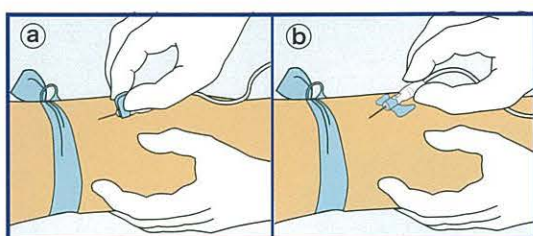

2. 針カバーをまっすぐ引いて取り外し、① ② いずれかの方法で穿刺します。
① 親指と人差し指で翼部を持ち穿刺します。
② 本体部分を持ち穿刺します。
※誤まってボタンを押さないよう注意してください。


3. 翼にテープを貼り、ラインを固定します。

※ボタン部分にテープを貼らないでください。
※輸液中にボタンを押さないよう注意してください。

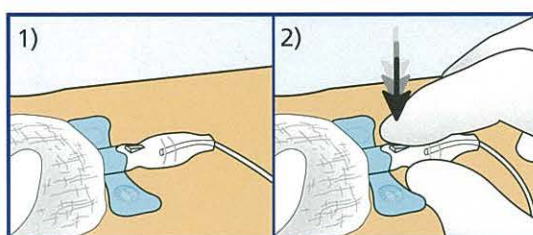



4. 1) 輸液終了後、滅菌ガーゼを穿刺部位を覆い、軽く押さえます。
2) 穿刺したままの状態では本体を持ち、ボタン（本体上の▼印部分）を押します。

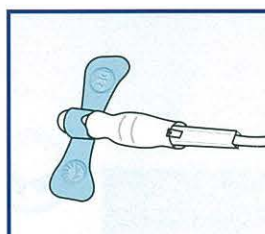※安全機能作動の妨げになるため、本体後方部分に触らないよう注意してください。



5. 針が完全に本体に収納されたことを確認し、速やかに耐貫通性廃棄容器に廃棄します。

BD プッシュボタン・インフュージョンセット

カタログ番号	カラー	針サイズ	付属チューブの長さ	ルアーアダプター	出荷単位
367326		21G 3/4	12インチ	無	50本/箱
367324		23G 3/4	12インチ	無	50本/箱

販売名: BD プッシュボタン・インフュージョンセット
医療機器認証番号: 220AFBZX00229000

*BD、BDロゴおよびその他の商標はBecton, Dickinson and Companyが保有します。©2009 BD



製造販売元
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
〒960-2152 福島県福島市土船字五反田1
本社: 〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ
www.bd.com/jp/

◆ 製品関連・資料請求
お客様情報センター

◆ 注文・納品・在庫のお問い合わせ
受注管理

☎ 0120-8555-90
FAX: 024-593-5761

BD バキュティナ® プッシュボタンインフュージョンセット 使用方法

輸液に使用する場合

パッケージ

パッケージの上から
ボタン部分を押さない
ように注意！
(○部分)



1. 準備



1.▲印から開封します。(▲印を手前にし、開封することで翼状針を取り出し易くなります。)

▼部分がボタン部分

2. 取り出し



2.翼状針の本体を指でつまみ、取り出します。この時ボタンを触らないように注意！

3. 穿刺



3.本体部分を持ち穿刺します。本体部分を持つことで逆流が確認しやすくなります。

採血中はボタンを触らないよう注意！

4. 固定




4. 右のポイントに注意し、固定をする。

<固定のポイント>

①テープをボタンの上に貼らないように注意！

②採血中はボタンを触らないよう注意！

5. 抜針および廃棄

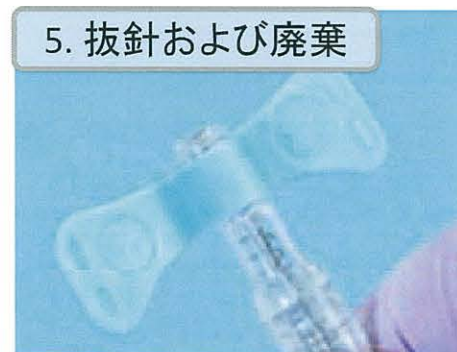

5. 採血の使用法と同様に、穿刺したままの状態、本体を持ちボタンを押します。抜針後は針が完全に本体に確認し、速やかに耐貫通性廃棄容器に廃棄します。