

● 注射器材廃棄容器 ●



キーパー2は針刺し防止のための容器です。

「使ったその場で廃棄する」その為の工夫がいっぱい入っています。



完全ロック機能

最終処理に出す時には、ツメで完全にロックできます。

フタは何度でも開閉できます。

リキャップホール

インスリン注射の針刺し対策に。

投入口

5mlまでの注射器は、針を外さず投入できます。
(翼状針、留置針 etc)

針外し機能

通常の注射器
ロック式注射器
両タイプに対応しています。

FULLラインシール

使用限度が一目で分かります。

半透明の本体・フタ

使用量が一目で分ります。

しっかりした取っ手

安心して持ち運べます。

バイオハザードマーク

鋭利物は黄色です。

針刺し防止の第一歩

KEEPER2

ディスポーザブル注射器材 廃棄容器



針刺しを防ぐために…すべての方の安全のために…

注射器材廃棄容器は、感染の危険のある注射器を廃棄する容器です。誤った使い方をすると次の使用者も危険です。ご使用に際しては、十分に注意して正しくお使い下さい。

特許第4750146号 意匠登録 第1166202号 第1166295号 実用新案登録 第3142386号 第3150317号

注射器材廃棄容器 キーパー2シリーズ

フタの開閉が簡単

FULLラインシールで使用限度が一目で分かる

持ち運びに安全な取っ手

インスリン注射の針刺し対策にリキャップホール

KEEPER2



- 本体の側面からも中身が見え、使用量等が分かります。

KEEPER2 プラス



- 本体が透けないため、内側に付着した血液等、本体側から見えません。

KEEPER2 アイキャッチャー



- 投入口を赤いプレートで半分の大きさにしています。(投入口に指が入る事を防ぎます。)

KEEPER3



- 20ml の注射器や採血ホルダー等、針を外さずに投入できます。

製品名	品番	容量	サイズ	JAN	入箱
キーパー2	002	1.5L	高さ14cm×長さ19cm×幅11.5cm	4560148430023	30個/箱
キーパー2 プラス	005	1.5L	高さ14cm×長さ19cm×幅11.5cm	4560148430054	30個/箱
キーパー2 アイキャッチャー	007	1.5L	高さ14cm×長さ19cm×幅11.5cm	4560148430078	30個/箱
キーパー3	009	2.5L	高さ23cm×長さ19cm×幅11.5cm	4560148430092	24個/箱

特許第4750146号

意匠登録 第1166202号 第1166295号

実用新案登録 第3142386号 第3150317号 第3150338号

日本製



容器



ラベル



有限会社 グッドツール

〒567-0031 大阪府茨木市春日2丁目3番7号
TEL.072-627-5518 FAX.072-624-2271

e-mail:office@goodtool.biz ホームページ www.goodtool.biz

お問い合わせは、弊社営業担当まで。

ご注文専用FAX.

0120-881-768

注射器材廃棄容器 [キーパー2・キーパー2プラス・キーパー2アイキャッチャー・キーパー3]

針刺しを防ぐために

すべての方の安全のために

注射器材廃棄容器は、感染の危険のある注射針を廃棄する容器です。誤った使い方をすると次の使用者も危険です。ご使用に際しては、十分に注意して正しくお使いください。

■ご使用になる前に

フタを本体にしっかりと
はめ込んで下さい。
平らな所で一気にはめ込んで下さい。



■最終処理に出す時には 製品ラベルや容器内ラベルの FULLラインになったときです。

- 1 フタのツメ2ヶ所 A を90度に折り曲げます。
- 2 差し込み口 B にしっかりと差し込み完全にロックをします。
(フタが開かない状態になります)



■投入口 抜針後、そのまま投入して下さい。


5ml までの注射器は、針を外さずに投入できます。
翼状針、留置針、採血ホルダーなども投入できます。
※キーパー3は20ml までの注射器に対応しています。

投入後はパチンと音がするように
フタを閉めて下さい。
(何度でも開閉できます。)

インスリン注射の針刺し対策に!

■リキャップホール

インスリン注射などに使う
ペン型注入器の針に
キャップをする機能です。

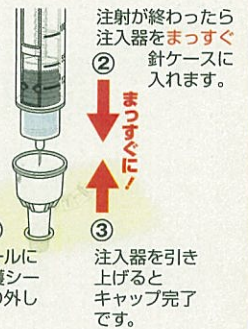

針ケースを ①
リキャップホール
に立てます。(保護シ
ールは完全に取り外
して下さい。)

② 針ケースを
まっすぐ
針ケースに
入れます。

注射が終わったら
注入器をまっすぐ
針ケースに入れます。

③ 注入器を引き
上げると
キャップ完了
です。




④ 針ケースを指で保持し、注入器
本体を反時計方向に回してから
取り外します。



⑤ 針ケースごと
廃棄して下さい。


■針外し機能 (病室などで注射器ごと廃棄できない時の、 緊急的な機能としても活用できます。)

●通常の注射器

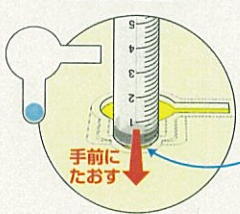


注射器をセットしてたおすだけで注射針が容器内に投入されます。
*引っ掛けて引き抜くではありません。


●中口タイプ

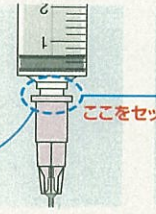

●横口タイプ

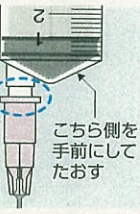

●ロック式注射器

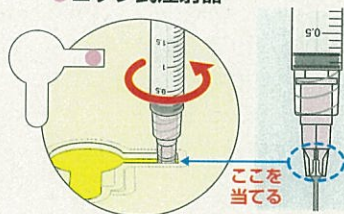

注射針の針元を型に当てて、左に回すと
簡単に外れ、容器内に投入できます。

- 破損、変形した物は使わないで下さい。
- 使った後は、必ずフタをして下さい。
- 容器を足下に置かないで下さい。
- 注射針などを無理に押し込まないで下さい。
- 使用限度のFULLラインは必ず守ってお使い下さい。
- 投入口に指などを入れないで下さい。
- 液体は、入れないで下さい。
- オートクレープなどの高温処理はしないで下さい。
- 完全にロックされた製品のフタを無理に開けて、再使用しないで下さい。
- 廃棄物を別の容器に移し替えたりしないでください。
- 最終処理時、必ずフタが完全にロックされている事を確認して下さい。

最終処理は、自施設の感染性
廃棄物(鋭利物)の処理規定
に基づいた方法で処理して
ください。

特許第4750146号 意匠登録 第1166202号 第1166295号 実用新案登録 第3142386号 第3150317号 第3150338号



製造元/有限会社 グッドツール

TEL.072-627-5518 FAX.0120-881-768

e-mail:office@goodtool.biz ホームページ www.goodtool.biz