

血液ガスシリンジ変更案内


【現行品】

物品コード番号: 2212002300
テルモ・プレザパックⅡ 3cc 22G x1.1/4
安全機能なし



【現行品】

物品コード番号: 2212001100
スミスディカル・プロベントプラス 3cc 22Gx1.1/4
安全機能付き

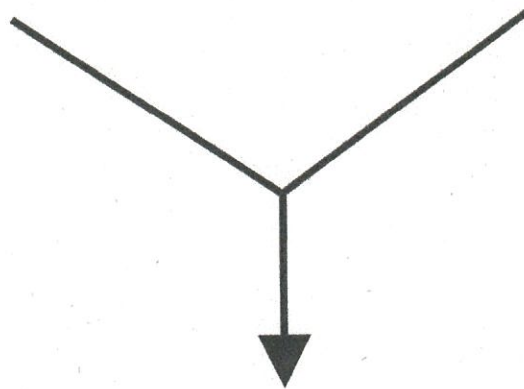


【新規採用品】


物品コード番号: 2212005121
BD・プリセット 3cc 22Gx1.1/4
安全機能付き




BD プリセット™ 動脈採血キット使用方法

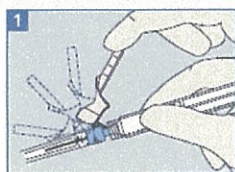


1 プランジャーをシリンジの推奨採血量の位置にセットします。片手でシリンジを持ち、もう片方の手でピンク色の安全シールドを手前に引きます。

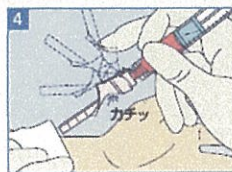


4 採血終了後抜針し、直ちに安全シールドを指で押し、カチッと音がするまで作動させます。針の部分を安全シールドごとシリンジから取り外して、廃棄適性廃棄容器に廃棄します。

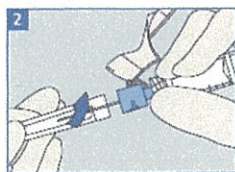


2 針カバーをまっすぐ引き抜いて取り外します。

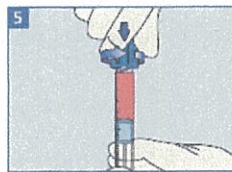

5 シリンジにヘモガードキャップをしっかりと取り付けます。

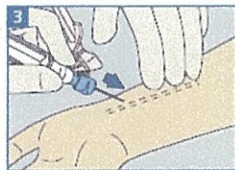

3 動脈穿刺を行ない、血液がシリンジ内のフィルターに到達するまで採血します。

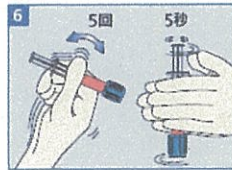

6 シリンジを5回 転回 混和 します。続いて、両手の平でシリンジを5秒間 振り 揉み 回転 させ、検体と抗凝固剤を十分に混和させた後、測定します。

【手動吸引をする場合】

- ①シリンジの目盛りを0に合わせてから穿刺します。
 - ②内筒(内筒の先端にあるフィルター)に血液が達したら、ゆっくりとプランジャーを引き、血液を採取します。
- シリンジ内に血液が達すると通気孔膜が自動閉鎖され、自動吸引が可能になります。