



BD バキュティナ® ブラッド トランスファー デバイス

シリンジ採血後の安全で正確な分注のために




BD バキュティナ® ブラッド トランスファー デバイス

シリンジ採血後、採血管や血液培養ボトルに分注するための安全器材です。

- 採血ホルダーとシリンジ接続用アダプターが一体化されており、組み立て不要で滅菌済みです
- あらゆる採血管に対応しています
- 血液培養ボトルへの血液分注に対応しています（添付文書に記載）



使用手順

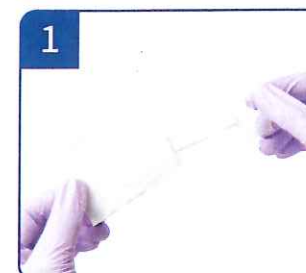

パッケージからブラッド トランスファー デバイスを取り出します。



針をはずしたシリンジの先にブラッド トランスファー デバイスを確実に取り付けます。




3 採血管への分注



BD/バクテック™
血液培養ボトル
への分注

シリンジを下向きにし、ブラッド トランスファー デバイスに採血管または血液培養ボトルを押し込みます。

- 注意**
- 採血管が飛び出さないよう手を添えてください
 - プランジャーを押し込まないでください

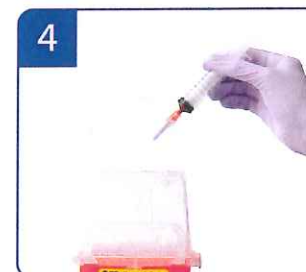

4

分注終了後、シリンジとブラッド トランスファー デバイスを取り付けたまま廃棄してください。

BD バキュティナ® ブラッド トランスファー デバイス

カタログ番号	出荷単位	統一商品コード
36488000	198 個 / 箱	555933884

販売名: BD バキュティナシステム
医療機器認証番号: 15000BZY00702000

血液の分注時にリスクを感じたことはありませんか？

シリンジから真空採血管や血液培養ボトルへの血液分注時には、針刺し損傷などの様々なリスクが伴います。

標準採血法ガイドラインでは、血液分注用安全器材を用いない方法は、「針刺しが生じるリスクが大きく、採血管への注入量が不正確になる可能性があるため、分注器の使用を推奨する」と改訂されました。

JCCLS 特定非営利活動法人 日本臨床検査標準協議会
「標準採血法ガイドライン (GP4-A3)」(2019 年 3 月 20 日発行)



※血液培養用の採血管（血液培養ボトル）は、ホルダー採血での使用を許可されていません



製造販売元
日本ベクトン・ディキンソン株式会社
カスタマーサービス www.bdj.co.jp/s/cs/

bd.com/jp/

BD, the BD Logo and all other trademarks are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates.
© 2023 BD. All rights reserved.
62-027-06



BD バキュティナ® ブラッドトランスファー デバイス 使用方法



- ① 針を外したシリンジの先にブラッド トランスファー デバイスを確実に取り付けます




- ② シリンジの先端を下向きにし、ブラッド トランスファー デバイスに血液培養ボトル、次に採血管を押し込みます
<注意>
- ・ 採血管が飛び出さないよう手を添えてください
 - ・ プランジャーを押し込まないでください



- ③ 分注終了後、シリンジとブラッドトランスファー デバイスを取り付けたまま廃棄します

☆フィルム栓の採血管は、デバイスの奥まで押し込まないで下さい
(フィルム栓の破損やゴムスリーブの外れなどにより、血液曝露が起こるおそれがあります)

この線が目安になります

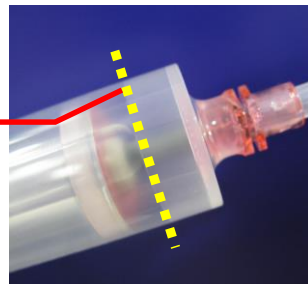

ゴムの周りに穴

