

注射器材廃棄容器 キーパー2シリーズ

色でわかる完全ロック機能

FULLラインシールで使用限度が一目で分かる

持ち運びに安全な取っ手

インスリン注射の針刺し対策にリキャップホール®

KEEPER2C

背面からもはっきりわかる
FULLライン

GOOD



エコマーク認定商品

●本体の側面からも中身が見え、
使用量等が分かります。

色でわかる
完全ロック機能

KEEPER2 アイキャッチャー



エコマーク認定商品

●投入口を赤いプレートで
半分の大きさにしています。
(投入口に指が入る事を防ぎます)

色でわかる
完全ロック機能

KEEPER2 プラス



エコマーク認定商品

●本体が透けないため、
内側に付着した血液等、
本体側から見えません。

色でわかる
完全ロック機能

KEEPER3



エコマーク認定商品

●20mlの注射器や
採血ホルダー等、針を外さずに
投入できます。

色でわかる
完全ロック機能

製品名	品番	容量	サイズ	JAN	入箱
キーパー2C	015	1.5L	高さ14cm×長さ19cm×幅11.5cm	4560148430153	30個/箱
キーパー2プラス	005	1.5L	高さ14cm×長さ19cm×幅11.5cm	4560148430054	30個/箱
キーパー2アイキャッチャー	007	1.5L	高さ14cm×長さ19cm×幅11.5cm	4560148430078	30個/箱
キーパー3	009	2.5L	高さ23cm×長さ19cm×幅11.5cm	4560148430092	24個/箱

特許 第4750146号
実用新案登録 第3150317号 第3150338号 第3201698号 第3201699号

日本製 材質: R-PP, PP



エコマーク認定番号
21 118 002

有限会社 グツツール

〒567-0046 大阪府茨木市南春日丘3丁目6番1号
TEL.072-627-5518 FAX.072-624-2271

e-mail:office@goodtool.biz ホームページ www.goodtool.biz

お問い合わせは、弊社営業担当まで。

ご注文専用FAX.

0120-881-768

注射器材廃棄容器

キーパー2Cは針刺し防止のための容器です。

「使ったその場で廃棄する」その為の工夫がいっぱい入っています。

GOOD

色でわかる完全ロック機能

最終処理に出す時には、
グリーンのツメで完全に
ロックできます。

リキャップホール®

インスリン注射の
針刺し対策に。

針外し機能

通常の注射器
ロック式注射器
両タイプに対応
しています。

注射器から針を外
さないと入らない
時などに有効です。

半透明の
本体・フタ

使用量が一目で
分かります。

しっかりした取っ手

安心して持ち運べ
ます。

フタは何度でも開閉できます。

投入口

5mlまでの注射器は、
針を外さず投入できます。
(翼状針、留置針etc)

GOOD

背面からもはっきりわかる
FULLライン

使用限度が一目で分かります。

FULLラインシール



エコマーク認定商品

リサイクル原料を使用し
ています。
必ず使うモノだからこそ
環境負荷を少なく。
地球温暖化防止対策・
SDGsに貢献。

針刺し防止の第一歩

KEEPER2C

ディスポーザブル注射器材 廃棄容器



針刺しを防ぐために…すべての方の安全のために…

注射器材廃棄容器は、感染の危険のある注射器を廃棄する容器です。誤った使い方をすると
次の使用者も危険です。ご使用に際しては、十分に注意して正しくお使い下さい。

注射器材廃棄容器 [キーパー-3]

針刺しを防ぐために

すべての方の安全のために

注射器材廃棄容器は、感染の危険のある注射針を廃棄する容器です。誤った使い方をすると次の使用者も危険です。ご使用に際しては、十分に注意して正しくお使いください。


■ご使用になる前に

フタを本体にしっかりと
はめ込んで下さい。
平らな所で一気にはめ込んで下さい。



■最終処理に出す時には 製品ラベルや容器内ラベルの FULLラインになったときです。

- 1 フタのツメ(グリーン部)2ヶ所 A を
90度に折り曲げます。
- 2 差し込み口 B にしっかりと差し込み
完全にロックをします。
(フタが開かない状態になります)

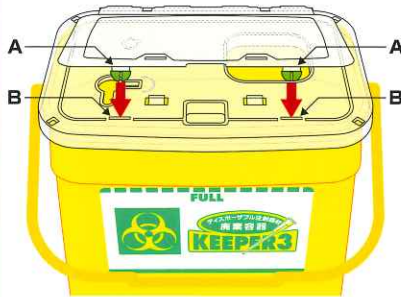

投入口

抜針後、そのまま投入して下さい。

20ml までの注射器は、針を外さずに投入できます。
翼状針、留置針、採血ホルダーなども投入できます。

投入後はパチンと音がするように
フタを開けて下さい。
(何度でも開閉できます。)



インスリン注射の針刺し対策に!

■リキャップホール®
インスリン注射などに使う
ペン型注入器の針に
キャップをする機能です。



ペンニードル® プラス の場合

- 1 針ケースを
リキャップホール®に
立てます。(保護シールは完全に
取り外して下さい。)
- 2 注射が終わったら
注入器をまっすぐ
針ケースに入れます。
- 3 ② 注入器を引き
上げると
キャップ完了
です。

- 4 針ケースを指で保持し、注入器
本体を反時計方向に回してから
取り外します。




2回転半以上
回して下さい。




■針外し機能 (病室などで注射器ごと廃棄できない時の、 緊急的な機能として活用できます。)

●通常の注射器

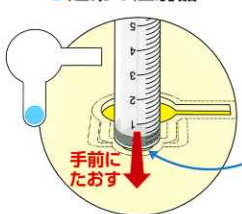


注射器をセットしてたおすだけで注射針が容器内に投入されます。
*引っ掛けて引き抜くものではありません。


●中口タイプ

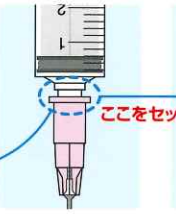

●横口タイプ

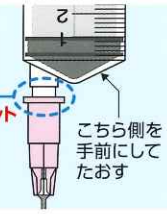

●ロック式注射器

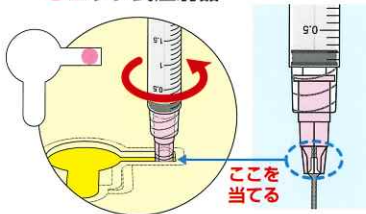

注射針の針元を型に当てて、左に回すと
簡単に外れ、容器内に投入できます。

取扱上の注意

- 破損、変形している製品は、使わないで下さい。
- 液状、泥状の物は、入れないで下さい。
- オートクレーブなどの高温処理は、しないで下さい。
- 注射器材の投入後は、フタをして下さい。
- 投入口には、指を入れないようにして下さい。
- 使用限度の FULL ラインは、守って下さい。
- 完全にロックした製品のフタを無理に開けて、
再度使用しないで下さい。
- 廃棄物は、別の容器へ移し替えたりしないで下さい。
- 廃棄物の入った容器は、足下に置かないで下さい。
- 最終処理時は、フタを完全にロックして下さい。

廃棄物(注射針など)の状況によっては、稀に針先が投入口のすぐそばに来しまう場合もあります。
注射器材の投入に際しては十分注意して下さい。
また、そのような時は FULL ライン以下であっても、それ以上使わないで下さい。

最終処理は、自施設の感染性
廃棄物(鋭利物)の処理規定
に基づいた方法で処理してく
ださい。

特許第4750146号
実用新案登録 第3150317号 第3201699号



製造元/有限会社 グットール

TEL.072-627-5518 FAX.0120-881-768

e-mail:office@goodtool.biz ホームページ www.goodtool.biz